



tradotim

Tradotim Oy, Raamikatu 1, 38200 Sastamala
puh. (03) 5128 500, fax (03) 5128 515
www.tradotim.fi

KÄYTTÖ/TURVALLISUUSOHJE 1(2)

4-pisteen lantiovyö

(tuotekoodit: EHB-0200, EHB-0501, EHB-0502, EHB-0503)


2-pisteen lantiovyö

(tuotekoodit: EHB-0106, EHB-0107, EHB-0110, EHB-0104, EHB-0111)



Nämä 4-pisteen ja 2-pisteen lantiovyöt on tarkoitettu ainoastaan pyörätuolissa tai muussa vastaavassa istuvalle.
Tämä turvavyö ei korvaa ajoneuvon omaa turvavyötä.

Varmista, että leveämmän hihnan pehmusteet ovat tiiviisti lantioluuta vasten. Vyön tulisi , jos mahdollista suunnata 60° kulmassa reiteen nähden. Näin estetään mahdollinen vyön aiheuttama paine lantioon ja pyörätuolissa istuvan asento pysyy optimaalisena.

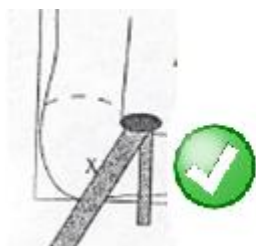

4-pisteen turvavyö




2-pisteen turvavyö



Huomio ! Turvavyön hihnanpää pujoitettava aina takaisin soljen läpi, jotta säädetty vyö olisi pitävä!



kuva 1

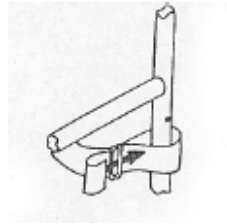


kuva 2

1. Voit kiinnittää turvavyön suoraan pyörätuolin runkoon mukana tulevilla metallisilla asennuslevyillä (kuva 1).

Tarkista pyörätuolin valmistajan ohjeista aiheuttaako runkoon tehtävien ylimääräisten reikien teko rakenteen heikkenemistä.

2. Voit kiinnittää turvavyön pyörätuoliin runkoon myös ilman metallista asennuslevyä (kuva 2).

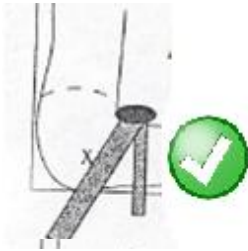

kuva 3



4-pisteen lantiovyön asennus

Sovita turvavyön leveämpi hihna kuvan 3 mukaisesti. Tämän jälkeen sovita kapeammat hihnat siten, että ne ovat kohtisuorassa linjassa alaspäin.

PUHDISTUS

Pese turvavyö lämpimässä vedessä (30 °C) ja ripusta kuivumaan. Ei saa käyttää valkaisuainetta.



valmistaja: Pro Walk GmbH