

JÄÄPIIKIN JA KRUUNUPIIKIN KÄYTTÖOHJE


SUOMI

Art.Nr.: 33960000 / 33960010

KÄYTTÖTARKOITUS:

Jääpiikin ja kruunupiikin tarkoitus on parantaa kävelyapuvälineen käyttäjän turvallisuutta jäisellä ja lumisella pinnalla.

valkoiset tulpat

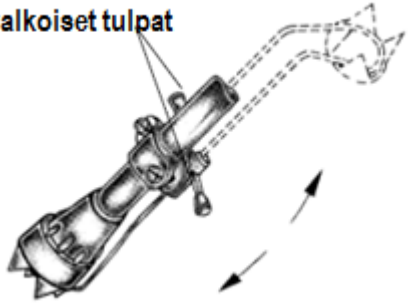

ASENNUS:

1. Ensimmäiseksi avaa kokonaan kaksi runko-osan ruuvia ja irrota ulompi kiinnitysosa.
2. Pidä jää-/kruunupiikkiä yhdessä kädessä ja purista molempia valkoisia tulpia yhteen.
3. Käännä nyt runko-osaa siten että pidempi osa pidätinmetallista on jääpiikin suunnassa.
4. Nyt voit asettaa jää-/kruunupiikin runko-osan kyynärsauvan tai muun kävelyapuvälineen alaosan putkea vasten. Asenna ensin irrotetut osat takaisin paikoilleen. Älä vielä kiristä ruuveja. Huomioi, että kääntömekanismi ei saa olla kävelysuunnassa jalan puolella.
5. Asenna nyt jää-/kruunupiikki siten, että tasainen puoli teräosaa on tukevasti pohjan kumitulppaa vasten. Kiristä ruuvit tiukasti.

Tarvittaessa asennuksessa avustaa tuotteita myyvän liikkeen ammattilainen.



TURVALLISUUSOHJEET

- Käyttötarkoituksen vuoksi jää-/kruunupiikki on terävä ja pistävä. Tämän vuoksi on olemassa risti viilto- tai pistovammaan.
- Noudata tarkoin asennusohjeita
- Huomioi, että kääntömekanismi on tukevasti asennettu.
- Käytä jää-/kruunupiikkiä vain jäisellä tai lumisella pinnalla ja vain ulkona.
- Älä koskaan käytä jää-/kruunupiikkiä aralla pinnalla.
- Käytä jääpiikkiä varoen sillä huolimaton käyttö saattaa aiheuttaa myös ulkopuoliselle pistotai viiltovammoja.
- Irrota tai poista jääpiikki kun sitä ei enää tarvita.

TAKUU: Lakisääteisten takuuoikeuksien mukainen. Takuu ei kata seuraavia tapauksia: epäasianmukaisesta käytöstä aiheutuneet vauriot, normaali kuluminen ja kulutus sekä puutteet, joilla on ainoastaan epäoleellinen vaikutus laitteen arvoon tai käyttökelpoisuuteen.

JÄÄPIIKIN JA KRUUNUPIIKIN KÄYTTÖOHJE


SUOMI

Art.Nr.: 33960000 / 33960010

KÄYTTÖTARKOITUS:

Jääpiikin ja kruunupiikin tarkoitus on parantaa kävelyapuvälineen käyttäjän turvallisuutta jäisellä ja lumisella pinnalla.

valkoiset tulpat

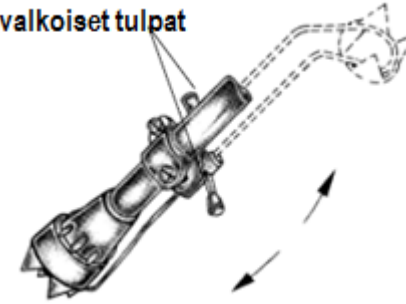

ASENNUS:

6. Ensimmäiseksi avaa kokonaan kaksi runko-osan ruuvia ja irrota ulompi kiinnitysosa.
7. Pidä jää-/kruunupiikkiä yhdessä kädessä ja purista molempia valkoisia tulpia yhteen.
8. Käännä nyt runko-osaa siten että pidempi osa pidätinmetallista on jääpiikin suunnassa.
9. Nyt voit asettaa jää-/kruunupiikin runko-osan kyynärsauvan tai muun kävelyapuvälineen alaosan putkea vasten. Asenna ensin irrotetut osat takaisin paikoilleen. Älä vielä kiristä ruuveja. Huomioi, että kääntömekanismi ei saa olla kävelysuunnassa jalan puolella.
10. Asenna nyt jää-/kruunupiikki siten, että tasainen puoli teräosaa on tukevasti pohjan kumitulppaa vasten. Kiristä ruuvit tiukasti.

Tarvittaessa asennuksessa avustaa tuotteita myyvän liikkeen ammattilainen.



TURVALLISUUSOHJEET

- Käyttötarkoituksen vuoksi jää-/kruunupiikki on terävä ja pistävä. Tämän vuoksi on olemassa risti viilto- tai pistovammaan.
- Noudata tarkoin asennusohjeita
- Huomioi, että kääntömekanismi on tukevasti asennettu.
- Käytä jää-/kruunupiikkiä vain jäisellä tai lumisella pinnalla ja vain ulkona.
- Älä koskaan käytä jää-/kruunupiikkiä aralla pinnalla.
- Käytä jääpiikkiä varoen sillä huolimaton käyttö saattaa aiheuttaa myös ulkopuoliselle pistotai viiltovammoja.
- Irrota tai poista jääpiikki kun sitä ei enää tarvita.

TAKUU: Lakisääteisten takuuoikeuksien mukainen. Takuu ei kata seuraavia tapauksia: epäasianmukaisesta käytöstä aiheutuneet vauriot, normaali kuluminen ja kulutus sekä puutteet, joilla on ainoastaan epäoleellinen vaikutus laitteen arvoon tai käyttökelpoisuuteen.