



Yleistä

Tämä käyttöohje kattaa kuvauksen SC-rampeista ja opastuksen tuotteen oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Lue käyttöohje huolellisesti. Valmistaja kehittää (Mobilex A/S) tuotteitaan jatkuvasta ja pidättävät oikeuden muuttaa tuotteittensa teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteen käyttötarkoitus

Mobilexin Alligator Rampit ovat lääkinällisiä laitteita, jotka ovat tarkoitettu ainoastaan pyörätuolia ja/tai sähkömopoa käyttäville asiakkaille. Ramppi mahdollistaa esteettömän kulun korotetuissa kohteissa kuten esimerkiksi portaissa. Ramppia voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa. Muussa käyttötarkoituksessa tuotetta ei saa käyttää.

Tuotteeseen liittyviin kysymyksiin vastaa rampin maahantuoja:

Tradotim Oy, Raaminkatu 1, 38200 Sastamala, puh 03 – 512 8500, fax. 03 – 512 8515, E-mail: info@tradotim.fi

Turvallisuusvaatimukset

Käytettävä ainoastaan virheetöntä tuotetta.

Jos tuotteessa havaitaan virheitä tai vikoja, tulee välittömästi ottaa yhteyttä maahantuojaan. Varmista, että kaikki henkilöt, jotka käyttävät tätä tuotetta ovat lukeneet tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen.

Emme korvaa vahinkoja, jotka johtuvat turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä.

Ramppien maksimi kantavuus (kg) jota ei saa ylittää on ilmoitettu Teknisessä tiedoissa.

Ramppia voidaan käyttää avustajan kanssa seuraavissa max. korkeuksissa:

SC-045	10 cm
SC-090	20 cm
SC-120	25 cm
SC-150	30 cm

Ramppia voidaan käyttää ilman avustajaa seuraavissa max.kaltevuuksissa:

SC-045	5 cm
SC-090	10 cm
SC-120	12 cm
SC-150	15 cm

Käytä ramppia vain sille tarkoitettuun käyttöön.

Vältä rakenteellisia muutoksia rampeihin ellei siihen ole valmistajan kirjallista hyväksyntää.

Ramppia tulee käyttää ainoastaan vakaalla alustalla.

Ole varovainen sulkiessasi ja avatessasi ramppia, tällöin voi olla vaarana että sormesi jäävät ramppipuoliskoiden väliin.

Tuotteen kuvaus

Mobilex SC-rampit ovat taitettavia alustoilta jotka on valmistettu alumiinista.


Pinta on erityisesti muotoiltu (ramppi liuskassa pitkittäisuritukset) liukastumisen estämiseksi.

Tekniset tiedot

Alligator SC ramppi	SC-045	SC-090	SC-120	SC-150
Pituus	46 cm	92 cm	122 cm	152 cm
Leveys avattuna	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm
Kulutuspinnan leveys	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm
Korkeus sivureunoilla	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Max kaltevuus/nousukorkeus	12° / 10 cm	12°/20 cm	12°/25 cm	12°/30 cm
Kokonaispaino	3,54 kg	6,68 kg	9,14 kg	11,43 kg
Max. kantavuus (kg)	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Taitetun rampin mitat (pit x lev. x kork) cm	46x36x10 cm	92x36x10 cm	122x36x10 cm	152x36x10 cm

Valmistajan tuotemerkki

Valmistajan tuotemerkki sijaitsee rampin sivulla (alla valmistajan tuotemerkistä)

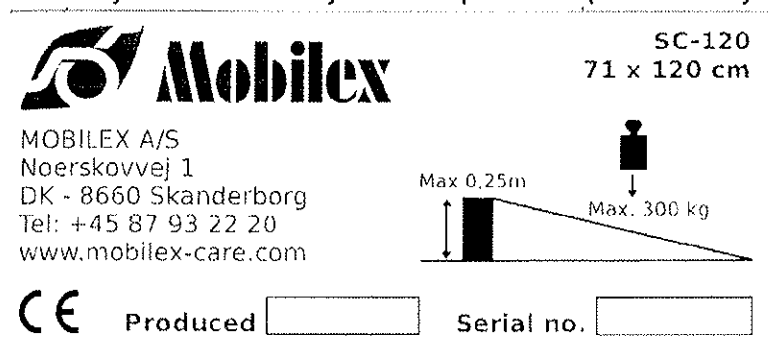

Huolto

Rampit eivät tarvitse huoltoa. Kuitenkin on suositeltavaa että aina ennen käyttöä tarkistetaan jos pinta on likainen tai puoliskojen saranat tuntuvat jäykiltä. Jos on aihetta epäillä rampin toimivuutta tai että tuote ei täytä teknisiä vaatimuksia ota yhteyttä maahantuojaan.

Huolimatta kestävästä rakenteesta ja käyttöä kestävästä materiaalista tuote kuluu normaalissa käytössä. On suositeltavaa, että tuotteen tunteva henkilö tarkistaa rampin säännöllisin väliajoin.

Yleisimmät ongelmat ja ratkaisut

Ongelma	Mahdollinen syy	Mitä tehdä
Ramppi ei ole vakaa	Ramppi ei ole tasaisella alustalla	Tarkista rampin asento. Aseta se tasaiselle ja sileälle pinnalle.
Ramppi ei ole vakaa	Ramppi on asetettu väärinpäin	Käännä ramppi oikeinpäin.

Tuotteen hävittäminen

Tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotisekäjätteen mukana vaan tuote on toimitettava paikalliseen kierrätyskeskukseen (ota selvää paikkakuntasi kierrätysjärjestelmästä).

Takuu

Valmistaja myöntää 2 vuoden takuun, joka korvaa valmistusviat. Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta on käytetty muuhun käyttötarkoitukseen kuin mitä tässä ohjeessa on mainittu. Takuu ei kata tuotteen normaalissa käytössä syntyneitä kulumista, ellei syy ole valmistusvirheessä. Vahingon tapahtuessa ota yhteyttä tuotteen maahantuojaan. Maahantuoja ei vastaa viallisen tuotteen mahdollisesti aiheuttamia välillisiä tai välittömiä vahinkoja.