

## SHG-GB50S-F

Turvavyö "päättymätön", metallilukko, 2000x50 mm

## KÄYTTÖOHJE 1(2)

Lue käyttöohjeet ennen turvavyön käyttöönottoa.

### TUOTTEEN KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä tuote on tarkoitettu pitämään henkilö paikoillaan pyörätuolissa, paareilla, vuoteessa tai muussa vastaavassa kohteessa.

Tämä turvavyö ei ole tarkoitettu polttomoottorikäyttöisiin kulkuneuvoihin.

### PUHDISTUS

Puhdistetaan kostealla liinalla.

Puhdistukseen ja desinfiomiseen ei saa käyttää aineita, jotka sisältävät klooria tai aktiivista klooria.

Älä käytä saippuavettä tai sitrusta sisältäviä pesuaineita.

### TUOTTEEN VAURIOITUMINEN


Jos turvavyö vahingoittuu edes osittain on se vaihdettava uuteen.

### TURVAVYÖN KÄYTTÖIKÄ

Tuote on vaihdettava uuteen turvavyöhän 5 vuoden välin oikeasta käyttötarkoituksesta ja/tai puhdistuksesta huolimatta.

## KÄYTTÖ


1. Kiinnitä turvavyö kokonaan tuolin ympäri.

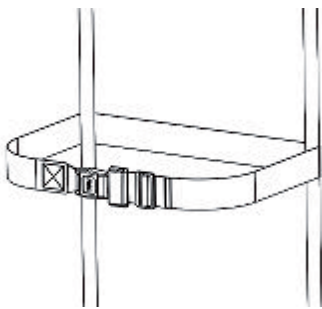

2. Lukon avaaminen ja lukitseminen

Paina "Press"-painiketta avataksesi turvavyön.

Aseta vyön kieleke lukkoon ja varmista, että se "klikahtaa" lukkoon.

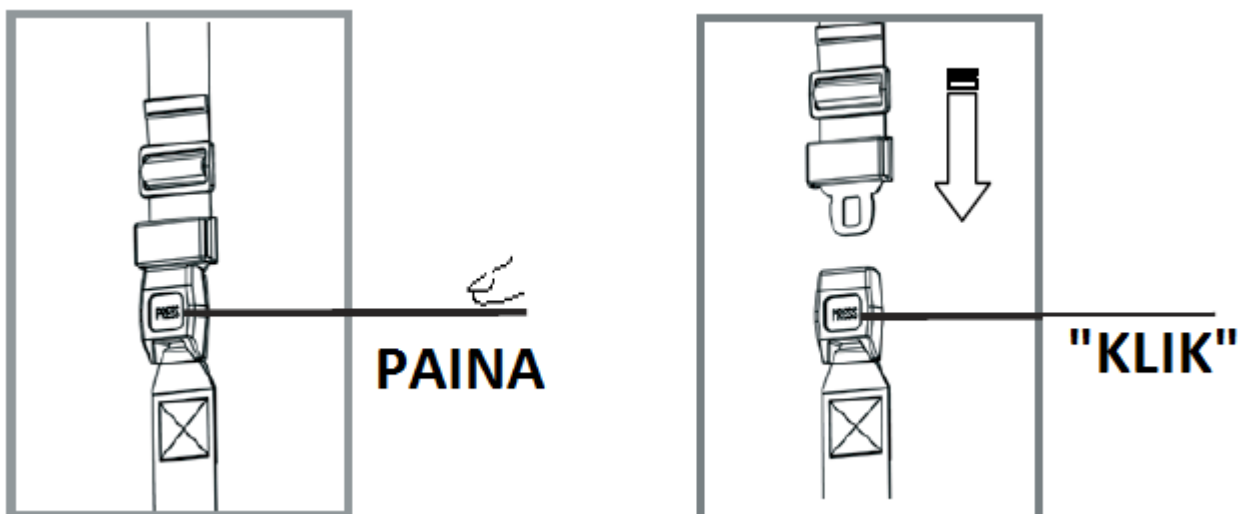

3. Turvavyötä voidaan tarvittaessa säätää portaattomasti, kun vyö on 90 asteen kulmassa lukkoon nähden, katso kuva.

