



tradotim

Tradotim Oy, Raaminkatu 1, 38200 Sastamala
puh. (03) 5128 500, fax (03) 5128 515
www.tradotim.fi

BRUK-/SÄKERHETSANVISNING 1(2)

4- punktshöftbälten

(produktkod: EHB-0200, EHB-0501, EHB-0502, EHB-0503)

2- punktshöftbälten

(produktkod: EHB-0106, EHB-0107, EHB-0110, EHB-0104, EHB-0111)



Dessa 4-punkts och 2-punktshöftbälten är endast avsedd för en rullstol eller för annan liknande hjälpmedel i sittande läge. Detta bälte ersätter inte bilens säkerhetsbälte.

Se till att den breda bältets bälteskuddar är tätt mot höftbenet. Bältet bör, om möjligt, rikta med 60° vinkel i förhållande till låret. Detta för att förhindra möjligheterna av bandet orsakar trycket i bäckenet och sittläget i rullstol är optimalt.



4-punkt säkerhetsbälte



2- punkt säkerhetsbälte



Huomio ! Turvavyön hihnanpää pujoitettava aina takaisin soljen läpi, jotta säädetty vyö olisi pitävä!

OBS !. Bältända måste föras alltid genom spännet så att den skall hålla bältet på sin plats.



fig. 1

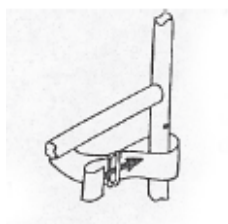


fig. 2

1. Du kan fästa bältet direkt till rullstolsramen med de medföljande metallmonteringsplattor (Figur 1).
2. Kontrollera rullstolstillverkarens anvisningar för att undvika att borringar minskar hållbarheten i rullstolsramen .
3. Du kan fästa säkerhetsbältet på rullstolsramen också utan metallmontageplåt (Figur 2).



fig 3



4- punktshöftbältens montering

Montera säkerhetsbältets breda bandet enligt figur 3. Montera sedan smalare bandet så att de är vertikalt nedåt.

RENGÖRING

Tvätta bältet i varmt vatten (30 ° C) och hängtorka.
Använd inte blekmedel.



tillverkare: Pro Walk GmbH