

Bruksanvisning

Aluminiumramper quick2go

quick2go° the aluminium ramp



Our ramps are statically tested by the



Läs denna bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter noga och kontrollera rampen innan du börjar använda quick2go ramp.

ANVÄNDNING

quick2go aluminiumramp tillåter obehindrad passage av rullstolar och elrullstolar, samt fyrhjuliga och åkgräsklippare enkel lastning vid förhöjda platser, exempelvis trappor eller lutningar på fordon. Rampens stödyta är special perforerad för att erbjuda en säker och halkfri yta för hjul. I rampens sidor finns kanter som förhindrar föremålet att glida i sidled.

TEKNISKA UPPGIFTER

Material: eloxerad aluminium

Design: Product RAMPER-T1 är ett stycke, ej förlängdbar modellen.

Produkt RAMPE-T2 är 2-del förlängdbar modellen.

Produkt RAMPE-T3 on 3- del förlängdbar modellen.

Produkt RAMPE-T2/T3 är kompakt förlängdbar modellen.

Produktförpackning 1 par

quick2go°	Vikt/st (kg)	Vikt/par(kg)	lastförmåga /st (kg)	lastförmåga st/par(kg)	Min längd (cm)	Max längd (cm)	Max höjd (cm)	Rampens bredd (S) (cm)	Sid kanternas (H) (cm)
RAMPE-T1	3,4	6,8	150	300	110	110	20	21	5
RAMPE-T2	6,5	13,0	150	300	110	200	40	19,5	5
RAMPE-T3	9,3	18,6	130	260	110	285	60	18	5
RAMPE-T2/3	6,8	13,6	130	260	87	200	40	18	5

ÅTERFÖRSÄLJARE:



Tradotim Oy
Osoite
Raamikatu 1,

Puhelin
(03) 5128 500

Fax
(03) 5128 515

Sähköposti
info@tradotim.fi

Internet
www.tradotim.fi

Kotipaikka
Sastamala
Y-tunnus
2425714-2

Bruksanvisning

Aluminiumramper quick2go

SKYDDSINFORMATIONSBLAD



- Observera den maximala lastkapacitet på ramper, rampens bredd (S), den tillåtna höjden av barriären och förhindrets profilhöjd.
- Se till att rampens monterings underläget är lämpligt. Halkfri bottenyta av rampen ska ställas jämnt mot ytan.
- Ramper är endast avsedda för måttlig hastighet, kraftig acceleration och bromsning bör undvikas.
- Lasten ska vara jämnt på båda ramp par.
- Var mycket försiktig när du använder rampen är minusgrader, snö och blöta vädret.

ANVÄNDNING

Förlängning av rampen

- Öppna transportlåsningsen.
- Håll i handtaget på rampen när den är i horisontella läget (1) och öppna låsningen.
- Dra ut rampens rörliga delar utåt i horisontell riktning.
 - Utan låsning är delarna rörliga!
 - Öppna aldrig låset när rampen är i upprätt läge!
- Utdragning av rampen helt rekommenderas.
- Ställ rampens vinklat ända och gummibelagd undersida på en fast yta (2 + 3).



Lämpliga användnings plattformar

- När du ställer rampen till platsen där ytan är kantig, måste rampens halkfri yta ställas mot den noggrant och säkerställa att den sitter fast ordentligt.
 - När rampen är monterad i ett fordon måste dess fastsättning säkerställas!
 - Stabil och fast installation ska garanteras!
- Rampen måste monteras på halkfri och marken under den skall vara platt (5).
- Båda delarna av rampen måste monteras parallellt och på samma höjd

ÅTERFÖRSÄLJARE:



Tradotim Oy, Raamikatu 1, 38200 Sastamala
puh. (03) 5128 500, fax (03) 5128 515
www.tradotim.fi

Tradotim Oy
Osoite
Raamikatu 1,

Puhelin
(03) 5128 500

Fax
(03) 5128 515

Sähköposti
info@tradotim.fi

Internet
www.tradotim.fi

Kotipaikka
Sastamala
Y-tunnus
2425714-2

Bruksanvisning

Aluminiumramper quick2go

- Kontrollera avståndet av ramperna att den motsvarar användningen (**3**).
- Var uppmärksam på den maximala arbetshöjden av rampen (se tabell).
- Om du använder en rullstol utan hjälp, så att rullstolen endast kommer att drivas av din egen kraft, kan inte tabellens uppgifter tillämpas. I detta fall för sitthöjden i förhållande till längden på rampen vara högst 1: 7 (se sidan 4).



MONTERING AV RAMPEN

- Rengör smuts och skräp från rampen
- Ta rampen och tryck delarna ordentligt ihop.
- Vrid låsspaken för att låsa rampen (**4**).

ÅTERFÖRSÄLJARE:



Tradotim Oy
Osoite
Raamikatu 1,

Puhelin
(03) 5128 500

Fax
(03) 5128 515

Sähköposti
info@tradotim.fi

Internet
www.tradotim.fi

Kotipaikka
Sastamala

Y-tunnus
2425714-2


Bruksanvisning

Aluminiumramper quick2go


MAXIMAL HÖJD FÖR HINDRET:

- a) Elektriska rullstolar eller rullstolar med assistent

Max. RAMPE-T1:	110
RAMPE-T2:	200
RAMPE-T3:	285
RAMPE T2/3:	200

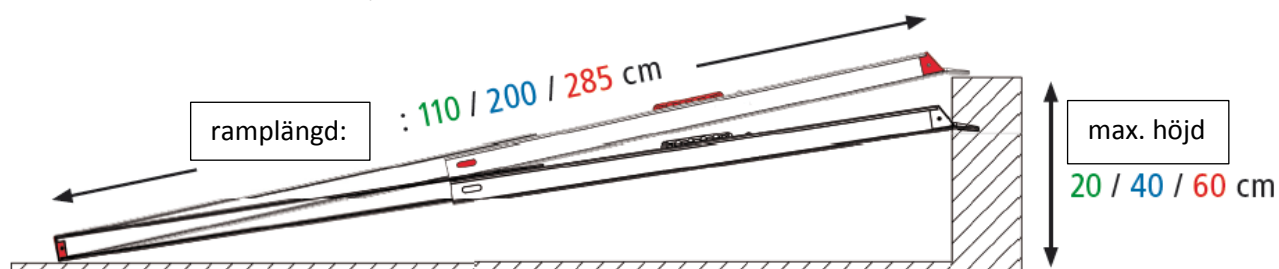

- b) Elektriska rullstolar eller rullstolar utan assistent (1:7)

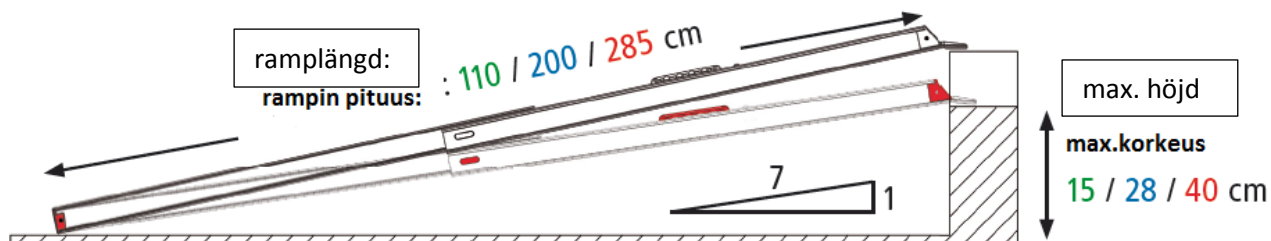

RENGÖRING

quick2^{go} – Aluminiumramp rengörs med en fuktig trasa, svamp eller borste. Använd inga kemikalier för rengöringen.

ÅTERFÖRSÄLJARE:



Tradotim Oy
Osoite
Raamikatu 1,

Puhelin
(03) 5128 500

Fax
(03) 5128 515

Sähköposti
info@tradotim.fi

Internet
www.tradotim.fi

Kotipaikka
Sastamala

Y-tunnus
2425714-2

Bruksanvisning

Aluminiumramper quick2go

RAMPENS ANVÄNDINGSTID OCH UNDERHÅLL

Aluminiumramp har inte en begränsad livslängd och kräver inget speciellt underhåll.

Plastdelar kan skadas eller aluminiumdelar kan bli böjda för felaktig användning. Plastdelar måste kontrolleras att de är korrekta efter varje användning. En defekt produkt bör inte användas! Nya plastdetaljer finns hos din återförsäljare.

Använd inte smörjmedel eller lösningsmedel på rampen.

CE-MÄRKNING

Denna produkt tillhör CE kategori 1, EU rådets direktiv 93/42 / EEG om medicintekniska produkter. Krav på överensstämmelse kan laddas ner från tillverkarens webbsidor:
www.rolko.com.

ÅTERFÖRSÄLJARE:



Tradotim Oy
Osoite
Raamikatu 1,

Puhelin
(03) 5128 500

Fax
(03) 5128 515

Sähköposti
info@tradotim.fi

Internet
www.tradotim.fi

Kotipaikka Y-tunnus
Sastamala 2425714-2